

NÁVOD K POUŽITÍ nalepovacích EKG elektrody

Elektroda se přiloží na povrch těla, aby přenesla elektrický signál na povrchu těla do záznamového a monitorovacího zařízení, které vytváří elektrokardiogram nebo vektorkardiogram.

Indikace: pro dospělé a dětské pacienty

Oblast použití/ Kontraindikace

Pro použití při pasivním snímání bioelektrických signálů z neporušené pokožky. Vzhledem k vysoké adhezivní síle adhezivního materiálu není tento produkt vhodný pro použití u pacientů s křehkou pokožkou.

Není vhodné pro použití u novorozenců a předčasně narozených dětí.

Aplikace

Otevřete sáček podél naznačené linie.

1. Určete místa aplikace. Odstraňte přebytečné chlupy, mozoly a zajistěte, aby byla pokožka zbavena všech olejů, krémů, kapaliny, nečistoty nebo jiné překážky dobrého elektrického kontaktu.

2. V případě potřeby očistěte pokožku vhodným přípravným materiálem. Vždy se ujistěte, že je místo aplikace suché

3. Připojte svodové vodiče k elektrodám, sejměte plastový kryt a ihned jej odhodte do odpadu.

4. Umístěte elektrody na kůži. Podle potřeby vyhladte povrch podkladu prstem.

Po monitorování zvedněte jazýček a jemně odstraňte elektrodu z kůže.

Odstraňte zbytky gelu, pokud existují, papírovou utěrkou nebo vodou.

Likvidace

Zlikvidujte jako nemocniční kontaminovaný odpad v souladu s platnými předpisy. Recyklujte balíček.

UPOZORNĚNÍ

Elektrody EKG by měl používat pouze lékař nebo po konzultaci s poskytovatelem zdravotní péče obeznámeným s jejich správným umístěním a použitím. Jakékoli alergické nebo jiné kožní reakce by měly být okamžitě vyhodnoceny lékařem. Pro použití pouze na neporušenou, čistou pokožku (nepoužívejte na otevřené rány, léze, infikovaná nebo zanícená místa).

Výrobek není určen pro vnitřní použití. V případě náhodného spolknutí elektrody se poraďte ihned lékařem.

Elektrody, které mají polypropylenové adaptéry / banánky a používají pro navázání spojení kolíkové kabely, musí být při zasunování nebo vyjímání kolíkových kabelů uchopeny za adaptér. To snižuje tlak jak na elektrody tak na kůži pacienta.

Pouze pro jednorázové použití. Použití u jiných pacientů může způsobit zkříženou infekci. Toto zařízení nenamáčejte, neoplachujte ani nesterilizujte, protože tyto postupy mohou zanechat škodlivé zbytky nebo způsobit poruchu zařízení. Design a použité materiály nejsou

kompatibilní s běžnými postupy čištění a sterilizace. Je třeba zajistit šetrné vytažení elektrod z pouzdra, aby nedošlo k poranění prstů, protože plastový kryt je jemně řezaný.

Neopatrné odstranění elektrody může způsobit poškození kůže. Pokud by elektroda byla porušená nebo lepidlo rozpuštěné.

NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE GEL SUCHÝ NEBO ZBARVENÝ.

Elektrody nepoužívejte, pokud zjistíte, že je pouzdro poškozené. Používejte elektrody bez svodových drátů pouze v kombinaci se schválenými patientskými kabely, adaptéry a EKG monitorovací zařízení. Nikdy nedovolte kontakt s externím elektrickým zdrojem.

V případě používání po delší dobu denně kontrolujte bezpečné přilnutí a absenci kožní reakce. Elektrody nesmí být přemístěny. Během chirurgických zákroků by měly být elektrody umístěny co nejdále od elektrochirurgické oblasti, aby se minimalizoval nežádoucí tok RF proudu.

Použití při MR:

Během MRI skenování by měly být elektrody používány se svodovými dráty vyhovujícími MRI. S výjimkou podmíněných elektrod MR při provádění skenování magnetickou rezonancí vyjměte elektrodu z pacienta, protože to může způsobit popálení kůže pacienta.

Potenciální nežádoucí příhody

Potenciální nežádoucí účinky ve vztahu k použití povrchových elektrod jsou kožní reakce, jako je popálení kůže, zarudnutí kůže, svědění kůže a malé puchýře

Doba používání

Elektrody EKG lze u pacientů používat až 48 hodin. Úložný prostor

Skladujte v originálních obalech chráněných před povětrnostními vlivy a při uvedených teplotách. Po otevření sáčku ihned použijte elektrody. Chraňte zbývající elektrody v původním obalu před ztrátou vlhkosti přeložením horní části a zajištěním. Zbývající elektrody by měly být použity do 30 dnů od otevření sáčku.

Prodej a distribuce:

AZ-Medica Shop
Komunardů 55
170 00 Praha
www.azmedicashop.cz