

Lékařský kyslík v plechu goX

(obsah 4l nebo 6l)

Návod na použití

Plněno lékařským kyslíkem.

Odstraňte opatrně folii. Sejměte modrý inhalační nástavec, otočte jej a tlakem nasadte na nádobku dle obrázku na nádobě. Dejte pozor, abyste se nedotýkali šedé spouštěcí páčky a náhodně nestiskli ventil. Šedou čerpací páčku sklopte dolů a inhalační nástavec nasadte na ústa a nos. Potom čerpací páčku **stiskněte palcem na cca 1 vteřinu** a zhluboka se nadechněte, alespoň pětkrát.

NEDRŽTE SPOUŠTĚCÍ ŠEDOU PÁČKU DLOUHO, JINAK DOJDE K RYCHLÉMU VYPRÁZDNĚNÍ OBSAHU NÁDOBY.

Obsah stačí pro cca. 40 resp. 60 nadechnutí dle velikosti plechovky.

Lze použít při tělesné únavě a nedostatečné koncentraci, dušnosti, dechových obtížích, pro rychlejší regeneraci během a po sportu, při alergických obtížích s dýcháním či při bolestech hlavy.

Pozor

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 250 st.C. Ani po použití neotvírejte násilím ani nevhazujte do ohně. Nestříkejte proti plameni nebo na žhavé předměty.

Tlak plnění: 1 MPa (10bar)

Objem plechovky: 0,4 l nebo 0,6 l

Obsah: 4l nebo 6l

Označení Es / číslo Es 231-956-9

Výrobce: MTI IndustrieGase. AG, Německo

Označení šarže/ Použitelné do: viz dno!

Nebezpečí vzplanutí při kontaktu s hořlavými látkami.

Nepatří do rukou dětem. Udržujte z dosahu hořlavých látek.

Do recyklační nádoby odhazujte pouze zcela prázdnou plechovku.

UPOZORNĚNÍ: Kyslík ve spreji goX je ve výrobě kontrolován a potom zataven do folie, aby se zabránilo manipulaci, znehodnocení nebo úniku obsahu nádoby. Obsažený kyslík má několik gramů, takže nádoba je lehká (nejedná se o tlakovou ocelovou nádobu).

Prodejce:

AZ-Medica Shop

Komunardů 55, Praha 7

Tel.: 724884041

www.azmedicashop.cz