

PENBLADE® Návod k použití




Jednoruční použití



Aktivace ve stylu
propisky



Zasunutí před
uvolněním

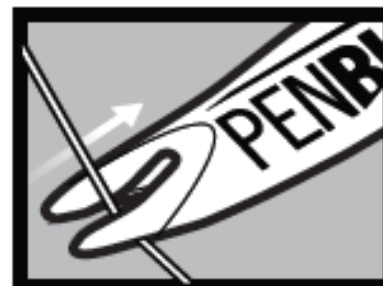

Drážka pro bezpečné
zkracování



Deaktivovat (volitelné)

POPIS NÁSTROJE: Nástroj PenBlade je skalpel obsahující mechanismus sloužící k vysunutí a zasunutí čepele mezi pracovní polohou a bezpečnou polohou pro uložení.

Skalpel PenBlade je opatřen čepelí velikosti 10, 11P nebo 15.

INDIKACE: Skalpel PenBlade je používán pro řezy do lidské pokožky a tkání a k odřezávání a zkracování stehů a katetrů až do 6 F.

UPOZORNĚNÍ: Federální zákony omezují prodej tohoto nástroje na lékaře nebo objednávku lékaře.

VAROVÁNÍ:

- Nástroj PenBlade je sterilní, jednorázový výrobek. Není určený ke sterilizaci a opakovanému používání.
- Čepel skalpelu je ostrá a v případě nesprávného použití může způsobit zranění.
- Dojde-li k zaseknutí vysouvacího tlačítka, nesnažte se čepel vysunout silou.
- Nikdy nezakrývejte špičku nástroje PenBlade rukou ani jinou částí těla.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Skladujte zabalené a zalepené nástroje na tmavém a suchém místě.
- Nástroj nesterilizujte v autoklávu ani nevystavujte působení organických rozpouštědel.
- Nepoužívejte nástroj PenBlade po datu uvedeném za textem „Use by“ na balení.
- Po použití nebo při odložení skalpelu PenBlade vždy zasuňte čepel.



Výrobce: ZIEN Medical Technologies, Inc.
2757 South 300 West, Suite F, Salt Lake City, Utah 84115, USA.
Telefon: +1 (385) 4442666.



Zástupce pro Evropu: Wellkang Ltd
Suite B, 29 Harley Street, London W1G 9QR, Anglie, Spojené království
Telefon: +44 (20) 3287633; Fax: +44 (20) 76811874

Návrh: PenBlade, Inc. Salt Lake City, Utah, USA. Telefon: +1 (801) 9031113 www.penblade.net

PBS513 Rev. E- CS