

# Pokyny k čištění

## 1. Vyjmutí plíce a dýchacích cest



Uvolněte úchytku lícní části na jedné straně.



Uvolněte popruh dýchacích cest na krku.



Uvolněte úchytku plíce ve spodní části těla.



Vyjměte spojku z otvoru v ústní desce.



Vyjměte a vyřadte plíci a dýchací cesty.

**Na konci denních školení a před uložením figuríny MiniAnne CPR na delší dobu proveďte následující čištění figuríny:**

1. Vyjměte a vyřadte použitou plíci a dýchací cesty.
2. Oddělte ústní desku od obličejové části figuríny.
3. Očistěte ústní desku a obličejovou část rukou v mýdlové vodě nebo v myčce (max. 60 °C), opláchněte a nechte uschnout.
4. Sestavte obličejovou část a ústní desku, vložte novou plíci a dýchací cesty, připevněte obličejovou část k figuríně, vyfoukněte tělo a uložte figurínu do původní krabice.
5. Před dalším použitím figuríny Mini Anne očistěte vnější povrch její obličejové části a její ústní dutinu utěrkou Manikin Wipe.

## 2. Čištění obličejové části



Použijte utěrku Manikin Wipe pro očištění vnějšího povrchu obličejové části.



Důkladně očistěte ústní dutinu utěrkou Manikin Wipe.



Očistěte zadní stranu ústní desky.

## 3. Vložení nové plíce a dýchacích cest



Vložte nepoužitou plíci a dýchací cesty pod hrudní desku. Přesvědčte se, zda tyto díly nejsou přehnuty nebo zkrouceny a také, zda je spojka dýchacích cest otočena směrem nahoru.



Připněte spojku dýchacích cest do otvoru v ústní desce. Přesvědčte se, zda je dobře připojena.



Prostrčte šipkovitě tvarovanou úchytku plíce skrz otvor ve spodní části těla. Upevněte tahem.



Upevněte popruh dýchacích cest na krku.



Vložte zpět úchytku lícní části. Figurína MiniAnne je nyní připravena k opětovnému použití. Před uložením po očištění figuríny MiniAnne vyfoukněte tělo a uložte figurínu do původní krabice. Neukládejte figurínu obsahující použitou plíci a dýchací cesty, nebo pokud nebylo provedeno čištění dle uvedených pokynů.