

Sada vzduchovodů Guedel

cs Návod k použití

1. Bezpečnostní pokyny



Pozor:

- 1.1 Pouze pro použití vyškoleným a kvalifikovaným personálem.
- 1.2 Výrobek je pouze na jedno použití. Nepoužívejte znovu. Opětovné použití může způsobit křížovou infekci a snížit spolehlivost a funkčnost produktu.
- 1.3 Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
- 1.4 Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých anestetik.
- 1.5 Uchovávejte mimo dosah přímého tepla a světla.

2. Účel použití

Guedel tubus slouží k udržování otevřených dýchacích cest. Používají se u pacientů v bezvědomí k prevenci zablokování jazyka dýchacími cestami, a tedy k udržení průchodnosti dýchacích cest ústní dutinou a hltanem.

3. Provoz/manipulace

- 3.1 Před použitím zkontrolujte volný průchod vzduchu
- 3.2 Pokud existuje obava ze selhání, okamžitě vyměňte Guedel tubus.

4. Technická data

4.1 Materiály

Tubus: Polyetylen (PE)
Skusový blok: Polypropylen (PP)

4.2 Velikosti a délky:

REF	HOT01-G000	HOT01-G00	HOT01-G0	HOT01-G1	HOT01-G2	HOT01-G3	HOT01-G4	HOT01-G5
Velikost	000	00	0	1	2	3	4	5
ISO velikost t/ délka (cm)	4	5	6	7	8	9	10	11

5. Vysvětlení symbolů

	Katalogové číslo
	Číslo šarže
	Datum výroby
	Výrobce
	Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství
	Datum použitelnosti
	V souladu s nařízením (EU) 2017/745
	Zdravotnické prostředek
	Přečtěte si návod k použití
	Pozor!
	Nepoužívejte opakovaně
	Neobsahuje latex
	Skladujte mimo přímé sluneční světlo

AEROTube®

QTY: 1

OT01-G000-5-BOX

REF



HOT01-G000-5-BOX

LOT




XXXXXXXXXX

cs Sada tubusu Guedel, 8 Guedel tubusu v úložném boxu,
velikost 000 až 5, délky 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 cm

YYYY-MM

YYYY-MM

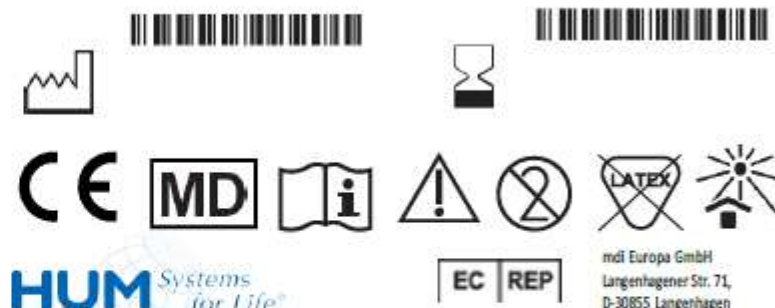

HUM Systems
for Life®

Evropský dovozce:

HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH Zum
Pier 79 | 44536 Lünen | Německo
FON +49 (0)2 31/ 88 08 85-0 | FAX +49 (0)2 31/ 88 08 85-58
Mail: sales@hum-online.de | <https://www.hum-online.de>

mdt Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855 Langenhagen

HSINER Co., Ltd.
No. 312, Jhongshan Rd., Shengang Dist.,
Taichung City 429, Taiwan

ID 4653798 Rev. 1.0 | 06.09.2021