

Trenažér dýchání TriGym

Návod k použití:

Zařízení se skládá ze tří válečků stupňovitě indikujících sílu vzduchového proudu. Odlišné barevné balonky ve válcích ukazují přibližnou velikost a sílu vzduchového proudu, který probíhá zařízením.

Trenažér rovněž obsahuje dvě nastavitelné klapky pro nezávislou kontrolu vdechového a výdechového odporu. Součástí balení je rovněž trubice s náustkem, tzv. „husí krk“
Po rozbalení prosím zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a neporušený.

A) Cvičení výdechu - expirium

- 1) otočte prosím otevíráním pro horní klapku, abyste dosáhli požadovaného odporu
- 2) čísla od 0 do 8 značí požadovaný stupeň odporu vzduchu
- 3) připojte hadici a náustek k zařízení a vydechujte vzduch do trubice, kontrolujte pohyb balonku

B) Cvičení nádechu - inspirium

- 1) otočte prosím otevíráním pro dolní klapku, abyste dosáhli požadovaného odporu
- 2) čísla od 0 do 9 značí požadovaný stupeň odporu vzduchu
- 3) připojte hadici a náustek k zařízení a nasávejte vzduch do trubice, kontrolujte pohyb balonku

Varování:

Výrobek je určen pouze pro použití jednou osobou.

Obsahuje malé části, nebezpečí vdechnutí či spolknutí

Nesterilní

Neobsahuje latex

Čistěte neagresivními detergenty

Nesterilizujte

Výrobek není určen pro použití více osobami

Pacient by měl být při používání výrobku pod dohledem odborného pracovníka

Prodejce:

AZ-Medica Shop

Komunardů 55

170 00 Praha

www.azmedicashop.cz