


NOUZOVÝ PLÁN

Vliv znečišťujících látek	Doporučený roztok pro výplach očí	Návod k použití	Pokračujte až do ošetření lékařem
Poranění mechanickými předměty např. prach, špína, kovové a dřevěné třísky	 ACTIOMEDIC® fyziologický roztok NaCl (0,9%)	Vyplachujte fyziologickým roztokem, dokud se předmět z oka nevyplaví.	 Opláchněte ACTIOMEDIC® fyziologickým roztokem NaCl (0,9%)
Poranění oka louhy nebo kyselinami	 Pufrovaný roztok pro výplach očí BioPhos®74	Vyplachujte oči BioPhos®74 po dobu přibližně 2,5 minuty, dokud se láhev nevyprázdní.	 Opláchněte ACTIOMEDIC® fyziologickým roztokem NaCl (0,9%)
Poranění oka jinými chemickými látkami, kromě látek obsahujících vápník, jako je cement a vápno.	 Pufrovaný roztok pro výplach očí BioPhos®74	Vyplachujte oči BioPhos®74 po dobu přibližně 2,5 minuty, dokud se láhev nevyprázdní.	 Opláchněte ACTIOMEDIC® fyziologickým roztokem NaCl (0,9%)
Jiné poranění způsobené například rozpouštědlem, olejem, kromě látek, které obsahují stříbro	 ACTIOMEDIC® fyziologický roztok NaCl (0,9%)	Vyplachujte oči, dokud nepříjemný pocit nezmizí.	 Opláchněte ACTIOMEDIC® fyziologickým roztokem NaCl (0,9%)



Vyjměte lahvičku z držáku nebo pouzdra na výplach očí.

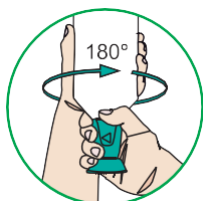

Otočte uzávěrem o 180° ve směru šipky, dokud se povolí jeho pojistka.



Mírně zakloňte hlavu a vymývejte poraněné oko.



Než odložíte láhev, nakloňte hlavu dopředu, abyste ochránili svůj oděv před vlhkostí.



DŮLEŽITÉ: Bez ohledu na typ poranění vždy vyplachujte oko rovnoměrným, jemným proudem a nechte je široce otevřené. Při vyplachování lahvičku lehce mačkejte.

V případě jakéhokoli poškození/kontaminace očí je nutné okamžitě vyhledat pomoc lékaře! Pokračujte ve vyplachování fyziologickým roztokem NaCl (0,9%), dokud nebude poskytnuta lékařská pomoc