

NÁVOD K POUŽITÍ

CORE PLUS



Obsah

Obecné informace	4
-------------------------	----------

Instalace	6
------------------	----------

1	Důležité informace	6
2	Identifikační štítek	7
3	Nastavení PIN kódu	8
4	Změna PIN kódu	9
5	Změna PIN kódu po připojení	10
6	Přípevnění/umístnění	11
7	Pokyny na přípevnění	12
8	Schematický pohled na přípevnění	15
9	Napájecí adaptér	16
10	Piktogramy/označení	17

Použití	18
----------------	-----------

1	Otevření ARKY Core Plus	18
2	Uzavření ARKY Core Plus	19
3	Pokyny pro případ nouze	20
4	Po použití AED	21
5	Údržba a čištění	21

Technické údaje	22
------------------------	-----------

Obecné informace

Před instalací a použitím ARKY Core Plus si přečtěte celý návod.

Důležité

- Údržbu a instalaci ARKY Core Plus by měl z bezpečnostních důvodů provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- ARKY Core Plus by měla být v ideálním případě namontovaná ve stínu a nikdy na přímém slunečním světle.
- Skříňku umístěte na rovnou zeď s dodržením minimálního volného prostoru a platných požárních předpisů.

Bezpečnost

- Při údržbě a/ nebo připojování ARKY Core Plus vždy vypněte napájení.
- Kolem ARKY Core Plus ponechte volný prostor aspoň 30 cm, aby byla zajištěna správná ventilace.
- Prostor u skříňky ARKY Core Plus vždy udržujte volný.
- Neinstalujte ARKY Core Plus v blízkosti radiátorů nebo jiných zdrojů tepla.
- Abyste předešlo riziku požáru a úrazu elektrickým proudem, zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm ARKY Core Plus.
- Nevkládejte ostré předměty do otvorů ARKY Core Plus.

Životní prostředí

- Nevyhazujte ARKY Core Plus a její obal do komunálního odpadu. Využijte sběrný systém dostupný ve vaší lokalitě. Použití sběrných systémů pomáhá chránit životní prostředí a zdraví.
- Pokud chcete ARKY Core Plus vrátit, použijte originální obal.

Záruka

Nedodržení následujících pokynů vede k zániku jakékoli výslovné nebo implicitní záruky:

- Neodstraňujte žádné části, které patří k ARKY Core Plus.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů ARKY Core Plus.
- Údržbu a opravy na ARKY Core Plus smí provádět pouze autorizovaný personál.

ARKY Core Plus Maximální ochrana pro váš AED

- Pět ventilátorů
- Dva topné články s termostatem Elektronický zámek s PIN kódem
- Vnitřní osvětlení
- Akustický alarm



Instalace


1 Důležité informace

Před instalací a použitím ARKY Core Plus si přečtete celý tento návod.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ


Nikdy neinstalujte ARKY Core Plus na přímém slunci. Ideálně by měl být umístěn na rovné stěně ve stinném místě. Vezměte v úvahu minimální volný prostor a platné požární předpisy.

- 1 Držák na stěnu
- 2 Kryt
- 3 Základna
- 4 2 vyhřívací články
- 5 Zámek
- 6 Prostor pro desku plošných spojů

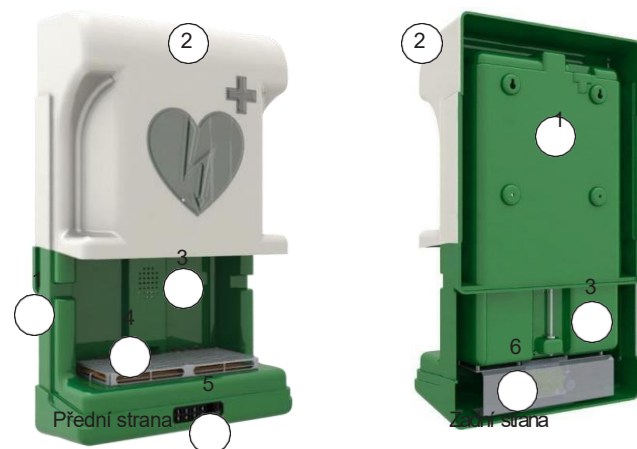

2 Identifikační štítek

Při kontaktu zákaznického servisu nebo vašeho dodavatele vždy uveďte označení typu a sériové číslo.

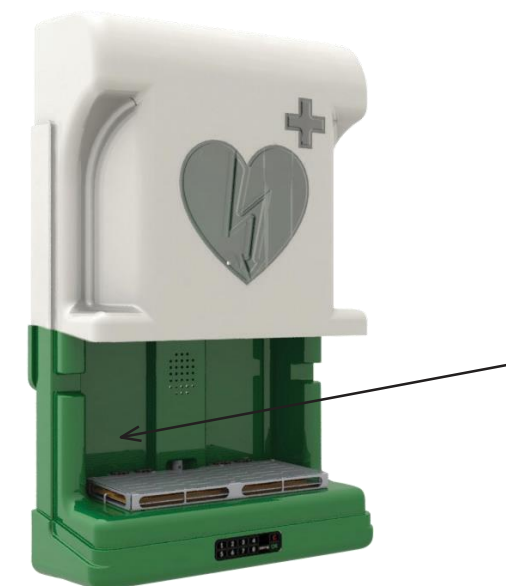


Identifikační štítek

3 Nastavení PIN kódu

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ

Při použití PIN kódu musí být ARKY Core Plus napájena vhodným zdrojem napájení.

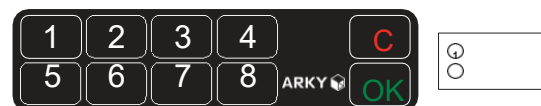

Zámek

Výchozí kód: : 1-5-1-5 (+OK)

Zadejte kód na zámku:

- Zadejte správný kód na zámku a potvrďte tlačítkem OK. Ozve se alarm a zámek se na 7 sekund odemkne.

Pokud po zadání nesprávného kódu bylo stisknuto tlačítko „OK“:
Zazní dva pípnutí. Následně můžete kód znovu zadat od prvního čísla.

• Pokud při zadávání kódu vyskytla chyba:

Stiskněte tlačítko „C“. Poté můžete kód znovu zadat od prvního čísla.

Bylo stisknuto tlačítko zámku nebo nebyl zadán celý kód (bez potvrzení tlačítkem „OK“):

Po 20 sekundách dojde k automatickému smazání vstupu. Kód lze poté znovu zadat od prvního čísla.

4 Změna PIN kódu



Tlačítko pro resetování desky plošných spojů

DOPORUČENÍ

Změňte kód před zavěšením skříňky. Při nastavování nového kódu musí být skříňka napájena elektrickým proudem. Změněný kód zůstane uložen i po odpojení napájení.

Změna kódu

Otevřete skříňku pomocí výchozího kódu (1-5-1-5 + OK). Zpřístupní se elektronická jednotka umístěná na zadní straně skříňky. Sejměte průhledný kryt. Nyní je přístupná deska plošných spojů. Krátce stiskněte resetovací tlačítko na desce plošných spojů a nastavte nový kód.

- 1 Po uvolnění resetovacího tlačítka zadejte aktuální kód.
- 2 Stiskněte tlačítko „OK“.
- 3 Zadejte nový kód.
- 4 Stiskněte tlačítko „OK“.
- 5 Nový kód je uložen a lze jej okamžitě použít.

Podmínky:

1 PIN kód se skládá 4 až 8 čísel.

2 Při nastavování nového kódu budou odmítnuté

a 1234

b Kódy začínající 4 stejnými číslicemi (0000, 1111, 222254 atd.)

5 Změna PIN kódu po připojení

Chcete-li změnit kód po zavěšení skříňky, nejprve proveďte následující kroky:

a Odstraňte (otevřenou) skříňku ze zdi.

Skříňku lze mírně nadzvednout, aby bylo možné ji sejmout ze zdi.

b Opatrně skříňku položte na zem/stůl nebo požádejte druhou osobu, aby ji podržela.

c Opatrně sejměte průhledný kryt ze zadní strany (viz obrázek vedle).

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ

Vytáhněte současně napájecí kabel ze zásuvky, aby nedošlo k jeho napnutí.



Průhledný kryt

6 Připevnění / umístnění


VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ

Použijte upevňovací materiály, které jsou vhodné pro typ povrchu, na který se ARKY Core Plus montuje. Minimální požadovaná únosnost je 20 kg.

Průměr šroubu: max. 8 mm
Průměr objímky: max. 12 mm

Přiložené upevňovací materiály

- 2 x podložka M5 pozinkovaná
- 4 x hmoždinka (8 x40 mm)
- 4 x šroub Torx (5 x50 mm) • 1x šroubovák Torx
- 1x vrtací šablona

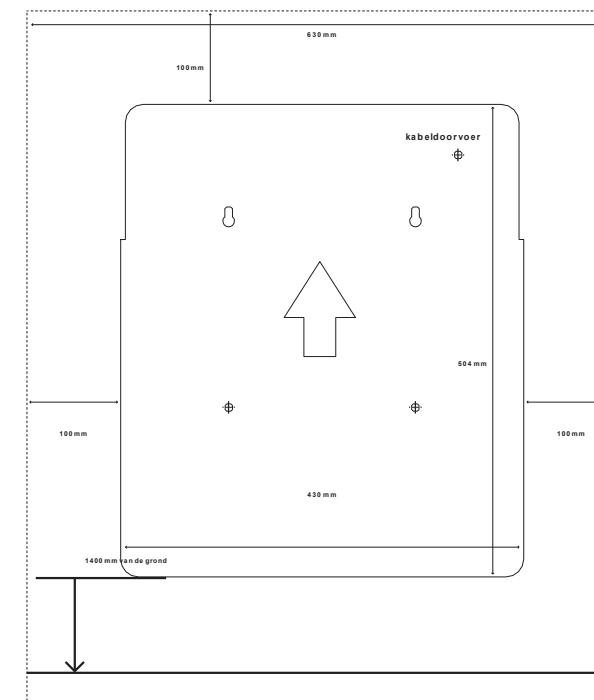

Přiložená vrtací šablona

7 Pokyny na připevnění

1 Identifikujte vhodné místo pro instalaci ARKY Core Plus.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMI

a Nikdy neinstalujte ARKY Core Plus na přímém slunci. Ideálně by měl být umístěn na stinném místě na rovné stěně.
b Vezměte v úvahu minimální volný prostor a platné požární předpisy.

2 Označte na zdi upevňovací body a kabelové vstupy. Použijte přiloženou vrtací šablonu.

3 Umístěte vrtací šablonu na zeď. Ujistěte se, že šipka je viditelná a směřuje nahoru. V případě potřeby upevněte vrtací šablonu na místo lepicí páskou. Doporučená vzdálenost od země: 140 cm, viz vrtací šablona.

4 Pomocí tužky/fixy označte otvory na stěně.

5 Odstraňte vrtací šablonu ze stěny.

6 Vyrvejte příslušné otvory podle zvoleného upevňovacího materiálu.

a Na základě přiložených upevňovacích materiálů: průměr vrtání 8 mm.

b Vstup kabelu: min. 8 mm.

7 Zasuňte do montážních otvorů zátky (kromě otvoru pro vstup kabelu).

8 Pouze do horních dvou montážních otvorů vložte šroub Torx a podložku. Utáhněte šroub a podložku pomocí šroubováku Torx a zajistěte minimální vzdálenost 3 mm mezi límcem a stěnou.

9 Provedte napájecí kabel otvorem pro vstup kabelu a protáhněte jej co nejdále.

10 Zavěste ARKY Core Plus za horní montážní otvory. Současně pokračujte v protahování napájecího kabelu. Dbejte na to, aby se kabel nedostal mezi skříňkou a stěnou.

DOPORUČENÍ

Montážní otvory jsou viditelné přes průhledné okénko na přední straně.

11 Připevněte konektor k napájecímu kabelu.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMI

Hnědá barva označuje + a modrá barva označuje -.

12 Připojte skříňku k napájecímu zdroji/síti pomocí přiloženého napájecího adaptéru.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMI
Minimální požadavky na napětí pro instalaci v budovách: 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz. Nikdy neumísťujte napájecí adaptér venku.

13 Pokud je ARKY Core Plus připojen správně, rozsvítí se LED páska ve skřínce.

14 Otevřete skříňku pomocí výchozího kódu: 1-5-1-5-OK (pokud je vyžadován jiný kód, proveďte kroky popsané v části 3).

15 Při otevřené skříni: v případě potřeby upevněte spodní montážní otvory pomocí šroubu/vrutu a plechové podložky.


16 Utáhněte všechny šrouby (včetně dvou horních) pomocí přiloženého otevřeného klíče nebo použijte ráčnový klíč.

17 Skříňka je nainstalována a připravena k použití.

8 Schematický pohled na upevnění

Schematický pohled na upevnění ke zdi (s přiloženým upevňovacím materiálem)

A. Zed'
B. ARKY Core Plus
C. Hmoždinka D.
Tor šroub

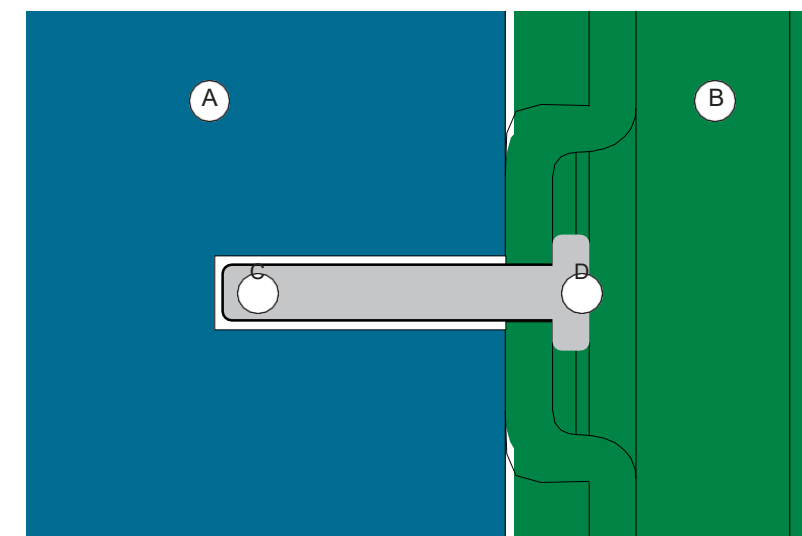

Pohled na průřez upevnění ke zdi

9 Napájecí adaptér

Napájecí adaptér vždy umístíte dovnitř

- ARKY Core Plus připojujte pouze k napájecímu zdroji/elektrické síti, kterou lze vypnout a uzamknout (při údržbě a/nebo odstraňování poruch vždy odpojte napájení).
- Údržbu a instalaci zařízení ARKY Core Plus smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Při provádění údržby a/nebo připojování zařízení ARKY Core Plus se ujistěte, že je napájení vypnuté. ARKY Core Plus je vybaven dvěma konektory pro připojení k elektrické síti.


VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ

Při nastavování jiného kódu, než výchozího může být užitečné (dočasně) ponechat napájecí kabel co nejdéle uvnitř a neupevňovat jej například kabelovými sponami, aby byla zajištěna volnost pohybu.

1 Stěna


2 ARKY Core Plus

Napájecí adaptér

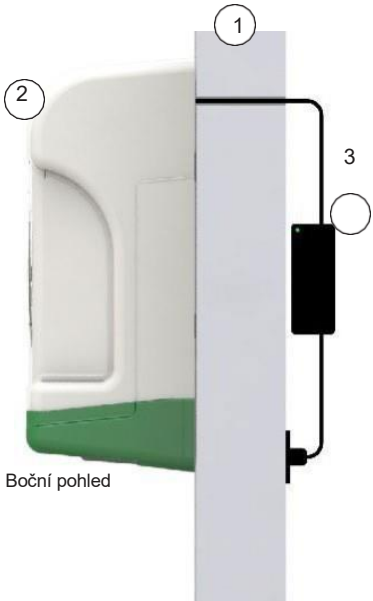

Boční pohled

10 Piktogramy/označení

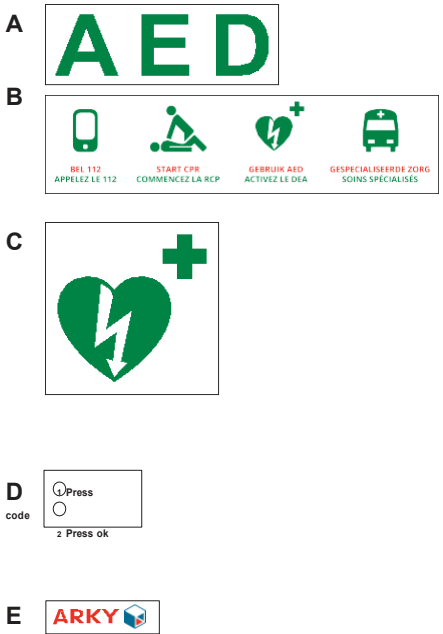


Použití

1 Otevření ARKY Core Plus

Otevřete ARKY Core Plus zadáním správného kódu na zámku a potvrďte tlačítkem „OK“.

Základna se automaticky posune dolů.

Jakmile se základna přestane posouvat dolů, vycentrujte AED na hliníkové desce proti zadní stěně.

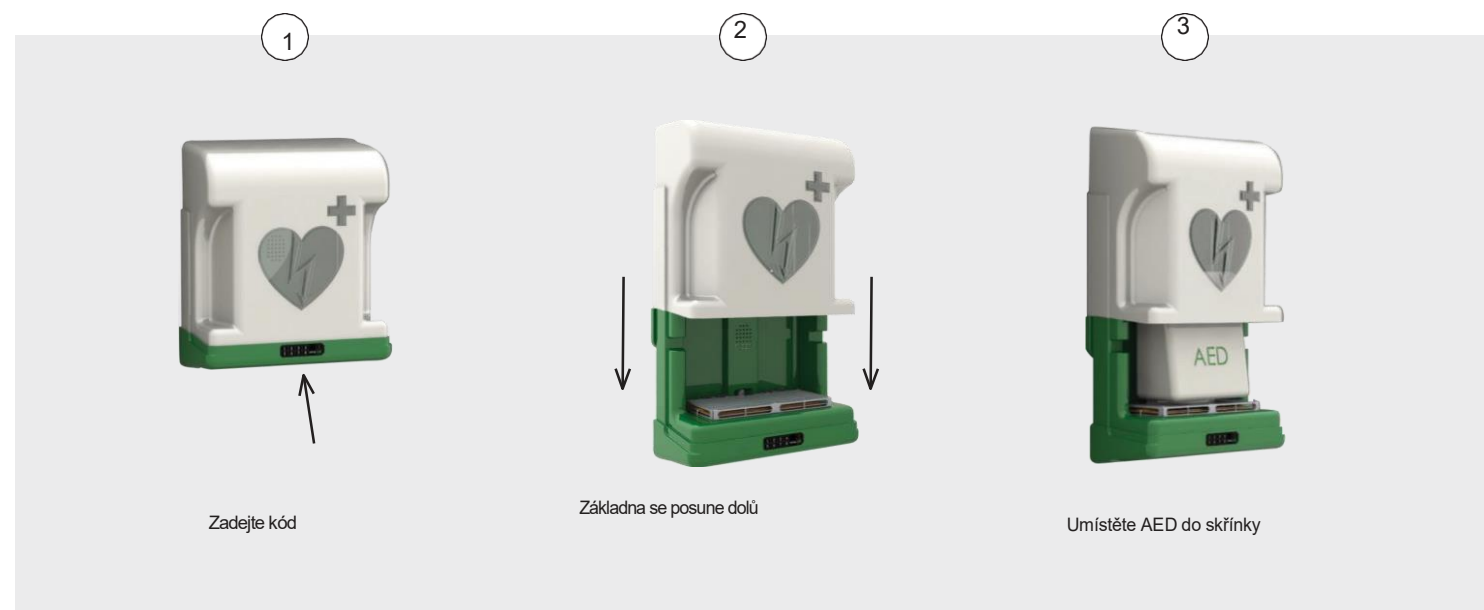

2 Zavření ARKY Core Plus

Položte ruce na obě strany základny a zatlačte směrem nahoru, dokud se základna pevně nezacvakne do drážku na zdi.



3 Pokyny pro případ nouze

V případě nouze proveďte následující kroky.

- 1 Zavolejte záchrannou službu
Mluvte hlasitě a zřetelně, popište situaci a uveďte místo.
- 2 Zahajte resuscitaci (KPR)
- 3 Otevřete skříňku
Zadejte správný kód a potvrďte tlačítkem „OK“.
- 4 Vyjměte AED ze skřínky
- 5 Přistupte k postiženému
- 6 Zapněte AED
- 7 Postupujte podle pokynů na AED



VOLEJTE 112



ZAČNĚTE KPR



POUŽIJTE AED



PRÍJEZD
ZÁCHRANNE
SLUŽBY

4 Po použití AED

- 1 Vraťte AED zpět do skřínky.
- 2 Zavřete skříňku.
- 3 Kontaktujte svého dodavatele.


5 Údržba a čistění

Z bezpečnostních důvodů by údržbu a instalaci zařízení ARKY Core Plus/připojení k elektrické síti měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Při provádění údržby a/nebo připojování zařízení ARKY Core Plus se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.

Čistění ARKY Core Plus:

- Povrchy ARKY Core Plus čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte chemické přípravky ani čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plastový kryt skřínky.
- ARKY Core Plus osušte měkkým, suchým a čistým hadříkem.
- Skříňku neotírejte tvrdými předměty. Mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození.
- K čištění ARKY Core Plus nepoužívejte vysokotlaký čistič.

Technické údaje

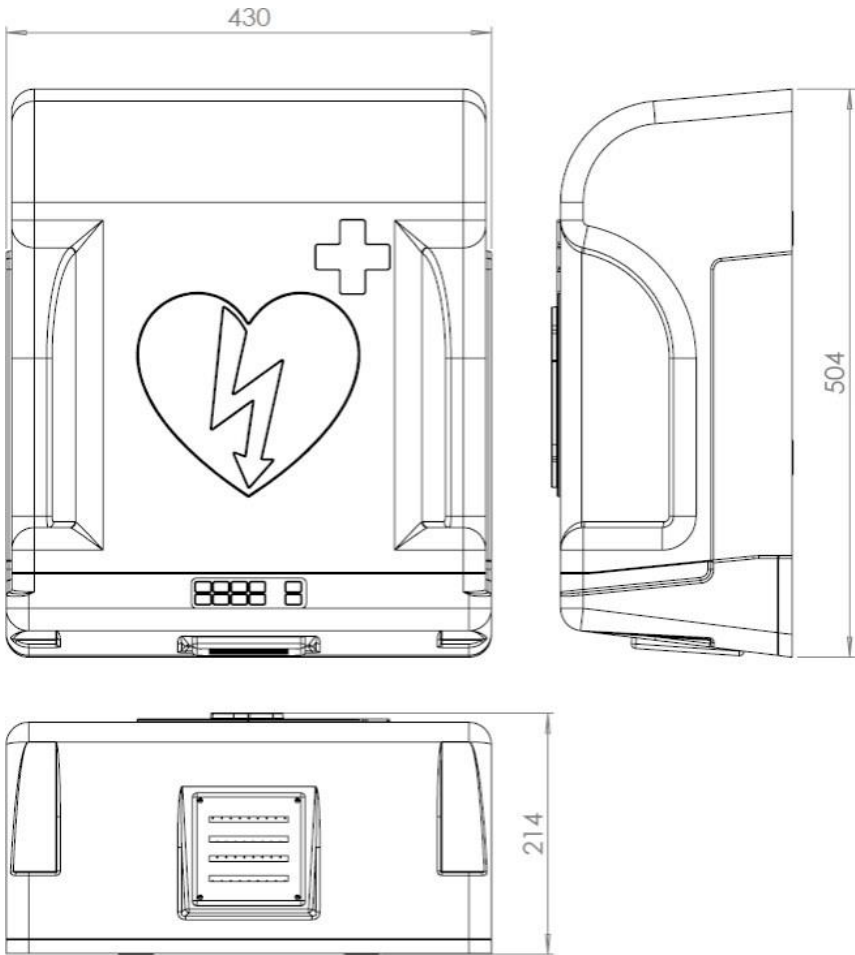

Celkové rozměry v mm

Rozměry

430 x504 x214 mm

Hmotnost

4,25 kg

Materiály

Držák:	ABS
Základna:	ABS
Kryt:	PETG
Kryt desky	
plošných spojů:	PETG
Montážní držák:	Hliník
Topný článek:	Hliník

Napájení

Napájecí adaptér:

Meanwell GST120A24-P1M

Vstup: 100-240VAC, 50/60Hz

Výstup: 24V – 5.0A, 120W MAX

Provozní teploty

ARKY Core Plus je navržena pro ochranu a skladování AED při okolní teplotě -30 °C až +50 °C.

Vytápění/ventilace

ARKY Core Plus je vybavená pěti ventilátory a dvěma topnými prvky o výkonu 24 V/45 W.

Vytápění:

Zapíná se při <7°C

Vypíná se při >10°C

Ventilace:

Zapíná se při >40°C

Vypíná se při <35°C

Alarm

Pokud je na zámku zadán správný kód (pokud je ARKY Core Plus napájen vhodným zdrojem napájení), skříň se otevře a zazní akustický alarm.

Alarm se po několika sekundách automaticky vypne.

Stupeň ochrany IP

ARKY Core Plus má stupeň ochrany IP55.



Verlengde Bremenweg 12
9723 JV Groningen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 50 311 60 85
sales@arkycase.com
www.arkycase.com

