

Blayco

POPISOVAČ NA KŮŽI

Název	Popis	Prezentace	Sterilita
RQ-01 TO	Popisovač kůže. Standardní hrot s pravítkem.	Individuální pouzdro.	
RQ-05 TO	Dvojitý hrot s pravítkem.	Individuální pouzdro.	



Dongguan Tondaus Meditech Co., Ltd
 Add:3rd Floor, No.27, Rd. Guantai, Chiling
 Community, Houjie Town, Dongguan,
 Guangdong, China
 Postal code 523900

EC REP MedPath GmbH
 Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
 80807 Munich, Germany

Distributor:
 AZ-Medica Educa s.r.o.
 Kaprova 42/14, Praha 1
 www.azmedicashop.cz
 Poslední revize textu: listopad
 2024

POPIS

Popisovač na kůži je zdravotnický prostředek používaný k označení kůže pacienta před chirurgickým zákrokem nebo během něj.

REFERENCE

Podrobnější informace o různých modelech naleznete v tabulce.

VLASTNOSTI

Popisovač na kůži se používá k označení nebo výběru operačního pole před nebo během chirurgického zákroku.

Dlouhotrvající, odolný proti otěru, téměř bez zápachu. Obsahuje především netoxickou, hypoalergenní a nedráždivou genciánovou violet. Jednorázový sterilní produkt, který nejde smýt během desinfekční procedury. Sterilní vzory (RQ-01 TO, RQ-05 TO) jsou sterilizovány zářením. Rychlé, snadné a pohodlné použití. Vhodné u výkonů v chirurgii, plastické chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, kardiovaskulární chirurgii a radiační terapii.

ÚČEL POUŽITÍ

Popisovač na kůži na označení a výběr operačního pole při diagnostických, radiologických a chirurgických zákrocích a při léčbě kožních chorob.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umyjte a osušte kůži pacienta. (nepoužívejte popisovač kůže ani pravítko na mokrou kůži).
2. Označte kůži.
3. Kůži desinfikujte jódem a označte ji.
4. K dezinfekci kůže a provedení zákroku použijte 75% alkohol.
5. V případě potřeby odstraňte značení z kůže pomocí alkoholu.

VAROVÁNÍ

1. Berte v úvahu možnost, že pacient může být alergický na genciánovou violet. V případě, že pacient pociťuje během používání přípravku nepříjemné pocity, přerušete použití a řádně jej ošetřete.
2. Jednorázový produkt pro předcházení infekci. Nepoužívejte jej opakovaně. Opakovaně nesterilizujte.
3. Chirurgický popisovač a pravítko používejte pouze na suchou kůži. V případě mokré nebo zpocené kůže ji osušte a dále postupujte podle návodu k použití.
4. Chraňte hrot během použití a po použití uzavřete krytem, aby nedocházelo k vysychání inkoustu.
5. Výrobek používejte ihned po otevření sterilního obalu. Po použití výrobek zlikvidujte v souladu s platnými nemocničními protokoly. Nepoužívejte, pokud je obal znečištěný nebo poškozený.
6. Výrobek nesušte ani nečistěte přípravky, které obsahují organická rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození výrobku.

KONTRAINDIKACE

- Používejte opatrně u pacientů s poškozenou vrchní vrstvou kůže nebo se zraněním. Nepoužívejte popisovač ani pravítko na mokrou kůži nebo povrch.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

- Žádné

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na chladném, suchém místě. Během skladování se vyhněte působení vody, přímého slunečního záření, extrémních teplot nebo vlhkosti a zamezte kontaktu s korozivními plyny.

- Doporučená teplota: <math>< 40^{\circ}\text{C}</math>

- Doporučená relativní vlhkost: $\leq 90\%$

- Sterilita je zaručena po dobu 3 let. Informace o datu expirace naleznete na obalu.

	Označení CE
	Katalogové číslo
	Jedinečný identifikátor výrobku
	Výrobce
	Dovozce
	Zdravotnický prostředek
	Datum expirace
	Kód šarže
	Nepoužívejte opakovaně
	Uchovávat v suchu
	Chránit před slunečním zářením
	Neobsahuje přírodní látky kaučukový latex
	Přečtěte si návod k použití
	Relativní vlhkost vzduchu
	Teplotní limity
	Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený
	Nepoužívejte opakovaně
	Jednoduchý sterilní bariérový systém
	Upozornění

Blayco

POPISOVAČ NA KŮŽI

Název	Popis	Prezentace	Sterilita
RQ-01 TO	Popisovač kůže. Standardní hrot s pravítkem.	Individuální pouzdro.	
RQ-05 TO	Dvojitý hrot s pravítkem.	Individuální pouzdro.	



Dongguan Tondaus Meditch Co., Ltd
 Add:3rd Floor, No.27, Rd. Guantai, Chiling
 Community, Houjie Town, Dongguan,
 Guangdong, China
 Postal code 523900

EC REP MedPath GmbH
 Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
 80807 Munich, Germany

Distributor:
 BEXAMED s.r.o.
 Miranova 148/10,
 102 00 Praha 10 – Hostivař,
 www.bexamed.cz
 Poslední revize textu: listopad 2024

POPIS

Popisovač na kůži je zdravotnický prostředek používaný k označení kůže pacienta před chirurgickým zákrokem nebo během něj.

REFERENCE

Podrobnější informace o různých modelech naleznete v tabulce.

VLASTNOSTI

Popisovač na kůži se používá k označení nebo výběru operačního pole před nebo během chirurgického zákroku.

Dlouhotrvající, odolný proti otěru, téměř bez zápachu. Obsahuje především netoxickou, hypoalergenní a nedráždivou genciánovou violet. Jednorázový sterilní produkt, který nejde smýt během desinfekční procedury. Sterilní vzory (RQ-01 TO, RQ-05 TO) jsou sterilizovány zářením. Rychlé, snadné a pohodlné použití. Vhodné u výkonů v chirurgii, plastické chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, kardiovaskulární chirurgii a radiační terapii.

ÚČEL POUŽITÍ

Popisovač na kůži na označení a výběr operačního pole při diagnostických, radiologických a chirurgických zákrocích a při léčbě kožních chorob.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Umyjte a osušte kůži pacienta. (nepoužívejte popisovač kůže ani pravítko na mokrou kůži).
- Označte kůži.
- Kůži desinfikujte jódem a označte ji.
- K dezinfekci kůže a provedení zákroku použijte 75% alkohol.
- V případě potřeby odstraňte značení z kůže pomocí alkoholu.

VAROVÁNÍ

- Berte v úvahu možnost, že pacient může být alergický na genciánovou violet. V případě, že pacient pociťuje během používání přípravku nepříjemné pocity, přerušete použití a řádně jej ošetřete.
- Jednorázový produkt pro předcházení infekci. Nepoužívejte jej opakovaně. Opakovaně nesterilizujte.
- Chirurgický popisovač a pravítko používejte pouze na suchou kůži. V případě mokré nebo zpocené kůže ji osušte a dále postupujte podle návodu k použití.
- Chraňte hrot během použití a po použití uzavřete krytem, aby nedocházelo k vysychání inkoustu.
- Výrobek používejte ihned po otevření sterilního obalu. Po použití výrobek zlikvidujte v souladu s platnými nemocničními protokoly. Nepoužívejte, pokud je obal znečištěný nebo poškozený.
- Výrobek nesušte ani nečistěte přípravky, které obsahují organická rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození výrobku.

KONTRAINDIKACE

- Používejte opatrně u pacientů s poškozenou vrchní vrstvou kůže nebo se zraněním. Nepoužívejte popisovač ani pravítko na mokrou kůži nebo povrch.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

- Žádné

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na chladném, suchém místě. Během skladování se vyhněte působení vody, přímého slunečního záření, extrémních teplot nebo vlhkosti a zamezte kontaktu s korozivními plyny.
- Doporučená teplota: <math>< 40^{\circ}\text{C}</math>
- Doporučená relativní vlhkost: <math>< = 90\%</math>
- Sterilita je zaručena po dobu 3 let. Informace o datu expirace naleznete na obalu.

	Označení CE
	Katalogové číslo
	Jedinečný identifikátor výrobku
	Výrobce
	Dovozce
	Zdravotnický prostředek
	Datum expirace
	Kód šarže
	Nepoužívejte opakovaně
	Uchovávat v suchu
	Chránit před slunečním zářením
	Neobsahuje přírodní látky kaučukový latex
	Přečtěte si návod k použití
	Relativní vlhkost vzduchu
	Teplotní limity
	Nepoužívejte, pokud je obal otevřený nebo poškozený
	Nepoužívejte opakovaně
	Jednoduchý sterilní bariérový systém
	Upozornění