



Basic Temp (DT-01B)


Rev.: IM-DT01B-03-09-2025

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., LTD, Building 2,1 # Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023 China

Shanghai International Holding Corporation GmbH, Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Dovozce pro ČR /CZ importer: Celimed s.r.o., Sociální péče 3487/Sa,400 11 Ústí nad Labem, Česká republika, www.celimed.cz

Dovozca/SK importer: Celimed s.r.o., Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, www.celimed.sk

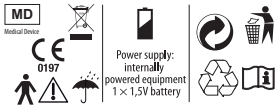

CZ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili digitální teploměr Basic Temp (DT-01B).

Před použitím vždy čtěte a uschovejte návod k obsluze. Tento digitální teploměr je určen k měření tělesné teploty a je vhodný jak pro klinické (ve zdravotnictví), tak pro domácí použití, kdykoli, kdy není třeba soustavného dozoru zdravotnického personálu. Tento teploměr je určen k orálnímu, rektálnímu a axilárnímu měření. Během měření postupujte přesně dle instrukcí uvedených v tomto návodu. Jakékoli jiné zacházení s teploměrem, než jak je uvedeno v návodu, bude považováno za nesprávné použití. Tento přístroj splňuje požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS – Směrnice pro zdravotnické prostředky a dále Evropskou normu EN 12470-3: Klinické teploměry – část tří: Výkon kompaktních elektrických teploměrů (prediktivních a neprediktivních) s maximálním zařízením, Evropskou normu EN60601-1-2 a je subjektem k určitým opatřením vzhledem k elektromagnetické kompatibilitě. Vezměte, prosím, na vědomí, že vysokofrekvenční komunikační systémy mohou ovlivnit přístroj.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento teploměr je určen pouze pro měření teploty těla, jakékoliv jiné použití je nevhodné a může být nebezpečné. Pokud naměříte neopadávající vysokou teplotu, zejména u dětí, prosím kontaktujte svého lékaře. Nikdy nekoušejte, neohýbejte a nerozebírejte teploměr. Pokud je přístroj poškozen nebo nefunguje řádně, vypněte ho a nepokoušejte se ho opravit vlastními silami, v opačném případě dojde k porušení platnosti záruky. V těchto případech vždy kontaktujte prodejce nebo autorizované centrum. Teploměr obsahuje malé části (baterie, bateriový kryt), které mohou být lehko spolknuté dětmi. Z tohoto důvodu nenechávejte, prosím, v přítomnosti dětí teploměr bez dozoru.

VAROVÁNÍ

Před použitím zkontrolujte produkt: nepoužívejte teploměr, pokud je poškozen. Neupustte teploměr na zem. Nenechte přístroj přijít do styku s rozpouštědly. Předjedíte vystavení nebo kontaktu se zdroji tepla. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vlhkosti nebo špině. Teploměr nerozebírejte, pouze pokud potřebujete vyměnit

baterii. Baterie musí být vždy mimo dosah dětí a od zdrojů tepla.

JAK MĚŘIT TEPLOTU

Před použitím teploměru vydesinfikujte koncovku pomocí hadříku navlhčeného v roztoku vody a alkoholu. Měření byste měli provádět vsedě (při orálním a axilárním měření). Před použitím teploměru je doporučeno se vyhybat pítí moc studených nebo moc teplých nápojů, cvičení, kouření, koupání nebo sprchování.

Při měření prosím postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko a vyčkejte, až se zobrazí „188,8“ a následně „L °C“, přibližně 3 vteřiny, teploměr je připravený k měření. Během měření můžete vidět stoupající hodnotu teploty na displeji. Jakmile teploměr doměří, uslyšíte pípnutí. Po odečtení naměřené teploty z displeje, teploměr vypnete zmáčknutím tlačítka ON/OFF, prodloužíte tím životnost baterie. Pokud tak ne učiníte, teploměr se automaticky vypne přibližně za 10 minut po měření. **Před měřením v ústech** nechejte ústa zavřená alespoň 1 minutu. Umístěte sondu teploměru pod jazyk a zavřete ústa a stiskněte tlačítko zapnout. Po naměření teploty zazní zvuková signalizace. Teplota naměřená v ústech je cca od 0,3–0,8 °C nižší než při rektálním měření. Měření trvá 50–70 vteřin.

Před měřením v podpaží osušte Vaši pokožku a ujistěte se, že je sonda teploměru v perfektním kontaktu s kůží. Zapněte teploměr a vyčkejte na zvukovou signalizaci. Teplota bývá o 0,5–1 °C nižší než při rektálním měření. Měření trvá 80–120 vteřin. **Pro přesnější výsledek se doporučuje měření v trvání 5-ti minut nelehde na zvukovou signalizaci (pípnutí) značí konec měření.**

Při **rektálním měření** vložte sondu do rektálního otvoru maximálně 2 cm hluboko a vyčkejte, až zazní zvuková signalizace. Měření trvá 40–60 vteřin. Rektální měření je považované za nejpresnější, protože měří vnitřní teplotu těla. Pro přehled o Vašem zdravotním stavu čtěte a zaznamenávejte teplotu a čas po každém měření. Poslední údaj se také automaticky ukládá v paměti teploměru.

PAMĚŤ – VYVOLÁNÍ POSLEDNÍ NAMĚŘENÉ HODNOTY

Poslední naměřená hodnota je vždy automaticky uložena v paměti teploměru. Poslední hodnota se zobrazí na displeji, pokud teploměr vypnete a znovu zapnete hned po zobrazení „L °C“. Pokud provedete další měření, nahradí v paměti předchozí hodnotu.

ÚDRŽBA

Čistěte teploměr vždy před a po použití pomocí hadříku navlhčeného ve vodě nebo v roztoku 70% ethanolu nebo isopropylu. Uchovávejte teploměr v plastovém pouzdru. Teploměr není vodotěsný, nikdy jej neponořujte do vody či jiných tekutin ani jej nedezinfikujte ponořením do dezinfekčních roztoků.

VÝMĚNA BATERIÍ

V případě, že LCD displej zobrazí symbol „“ vybité baterie v pravém spodním rohu, znamená to, že baterie potřebuje výměnu. Sundejte barevnou krytku konce teploměru. Za pomoci špičatého nekovového předmětu (např. pero) vyjměte starou baterii a nahraďte novou 1,5V typ LR41 za zachování polaritý +/- . Nasadte kryt baterie zpět.

Upozornění:

Pokud se Vaše pokožka dostane do styku s tekutinou z baterií nebo se Vám tekutina dostane do očí, opláchněte postiženou oblast vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nebezpečí udušení! Malé děti mohou spolknout nebo vdechnout baterie. Uchovávejte baterie mimo jejich dosah.

V případě, že došlo k úniku bateriové tekutiny,

oblečte si, prosím, ochranné rukavice a prostor vysušte suchým hadříkem. Chraňte baterie před horkem. Nikdy nevhazujte baterie do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu! Baterie nenabíjejte a ani nezkratujte. Pokud se nebude přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte. Používejte pouze stejné nebo podobné baterie s příslušnými parametry. Vždy měňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Nesnažte se baterie otevřít nebo jinak mechanicky poškozovat.

SYMBOLY

Postupujte dle návodu k obsluze
 Typ BF bezpečnostní třída
 Udržujte v suchém prostředí
Baterie je vyráběna v souladu s Evropskou směrnicí 2006/66/CEE

Výrobce
 Zástupce pro EU

Basic Temp (DT-01B) splňuje všechny požadované normy v souladu se směrnicí 93/42/CEE

Zdravotnický prostředek

LIKVIDACE ODPADU

Tento přístroj, včetně všech jeho vyměnitelných částí a příslušenství, nesmí být po skončení životnosti likvidován jako běžný odpad, nýbrž v souladu s evropskou směrnicí. Musí být zpracován odděleně od běžného odpadu, je třeba ho odnést do recyklačního centra pro elektrická a elektronická zařízení nebo jej vrátit prodejci při koupi nového ekvivalentního přístroje. Neuposlechnutí těchto pokynů může vést k přísným trestům. Baterie používané v tomto přístroji, musí být na konci jejich životnosti zanechány ve speciálních sběrných nádobách.

Záruka

Na tento přístroj platí záruka 2 roky od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením. Záruka se nevztahuje na baterie a obal. Záruka se nevztahuje na jakákoli další poškození. Při uplatňování záruky bude vyžadován doklad o zakoupení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kategorie produktu: Klinické elektronické teploměry
Model: Basic Temp (DT-01B)
Rozmezí pro měření teploty: 32 °C~42,0 °C
Zobrazení naměřené teploty: 3 číslice, v krocích po 0,1 °C
Teplota: < 32 °C ukáže Lo °C, > 42 °C ukáže Hi °C
Vodotěsný: NE
Přesnost měření: ±0,1 °C v rozmezí 35,5 °C~42,0 °C, mimo uvedené rozmezí: ±0,2 °C
Automatické vypnutí: cca po 10 minutách
Zvuková signalizace ukončení měření: 4 pípnutí za sebou, pokud se naměřená teplota nezmění více jak +/- 0,1 °C po dobu 16 vteřin
Displej: LCD

Napájení: 1× alkalicko-magneziová knoflíková baterie 1,5V typ LR41 – vyměnitelná
Životnost baterie: cca 100 hodin kontinuálního měření
Provozní podmínky: Teplota: +5 °C~35 °C, Vlhkost do 80 % relativní vlhkosti
Podmínky pro převoz a skladování: -25~55 %, do 95 % relativní vlhkosti
Rozměry výrobku: 125 × 18 × 8 mm
Váha produktu: 12 g (vč. baterií)

Očekávaná provozní životnost přístroje: cca 5 let

INFORMACE

O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ (EMC):
Zdravotnický teploměr Basic Temp (DT-01B) má být použit v elektromagnetickém prostředí, jak je uvedeno níže. Záruka nebo škoda nejsou záručí, že teploměr bude používat v tomto prostředí.

DEKLARACE A POPIS ELEKTROMAGNETICKÉ ENERIE UVEDENÝ VÝROBKEM		
Zdravotnický teploměr Basic Temp (DT-01B) má být použit v elektromagnetickém prostředí, jak je uvedeno níže. Záruka nebo škoda nejsou zárukou, že teploměr bude používat v tomto prostředí.		
Značka emise	Škola	Popis elektromagnetického prostředí
(elektromagnetická výboj) (E10)	±5kV při kontaktě ±5kV ve vzduchu	Předmět by měl být vyroben z dřeva, keramiky nebo keramiky. Pokud je použit kovový materiál, mělo by být v blízkosti přístroje.
CE/EN61000-6-2		
(elektromagnetická výboj) (E11)	3A/m	Magnetické pole by mělo odpovídat prostředí typické pro nemocnici.
CE/EN61000-6-3		
(elektromagnetická výboj) (E12)	70V/m 100kHz do 2,5GHz (ne pro přístroje s anténami)	
CE/EN61000-6-4		

MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő utasítások, adatok és ábrák a használati utasítás nyomtatásának időpontjában rendelkezésre álló információkon alapulnak, értesítési kötelezettség nélkül az esetleges módosítások, vagy változások esetén.