


MEDICOTM ELECTRODES

BG	ЕКГ електроди	IT	Sensori ECG
CS	Elektrody EKG	LT	Elektrokardiogramos elektrodas
DA	EKG elektroder	LV	ECG elektrodi
DE	EKG elektroden	NL	ECG-sensoren
EL	Ηλεκτρόδια ΗΚΓ.	NO	EKG-elektroder
EN	ECG electrodes	PL	Elektrody EKG
ES	Electrodos ECG	PT	Eléctrodos ECG
ET	EKG elektroodid	RO	Electrozi EKG
FI	EKG-elektrodeja	RU	ЭКГ электроды
FR	Electrodes ECG	SK	Elektrody ECG
HR	EKG elektrode	SL	EKG elektrode
HU	EKG elektródák	SV	EKG elektroder
HI	ई.सी.जी. इलैक्ट्रोड्स	TR	EKG Elektrotları
UR	چست الکتروود یکبار مصرف	ZH	心电图电极



Latex free

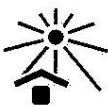

PVC free



Ag/AgCl
sensing element



MEDICO ELECTRODES INTERNATIONAL LTD.

[AN ISO 13485 COMPANY]

www.medicoelectrodes.com

Plot 142A/11, 12, 27, 28 & 29, Noida Special Economic Zone,
Noida, Uttar Pradesh - 201305, India



Medico Electrodes Ltd.
Blvd. Saint-Michel 65/6,
1040 Brussels, Belgium

Made In India



NÁVOD K POUŽITÍ

Oblasti použití / kontraindikace

- Určeno pro pasivní snímání bioelektrických signálů z povrchu neporušené kůže
- Vzhledem ke zvýšené adhezivitě elektrody není tento výrobek vhodný pro pacienty s jemnou či přecitlivělou kůží. Není vhodné pro použití na novorozencích nebo nedonošencích

Aplikace

- Sáček otevřete podél naznačené linie.
- Místo na kůži určené pro aplikaci elektrody zbavte výrazného ochlupení či zatvrdlých míst, kůži odmastěte a zbavte případně látek, které by mohly bránit kvalitnímu elektrickému kontaktu. Před vlastní aplikací elektrod musí být kůže suchá.
- K elektrodám připojte patientské kabely.
- Sejměte krycí plastovou folii a elektrodu umístěte na kůži. Podle potřeby vyhlad'te zadní povrch elektrody krouživým pohybem prsty.
- Po ukončení monitoringu jemně odstraňte elektrodu s kůže zvedáním nelepivého obloučku na jejím okraji
- Případné zbytky gelu odstraňte utěrkou nebo vodou

Likvidace

- Likvidujte v souladu s platnými pravidly jako kontaminovaný nemocniční odpad
- Použité obaly recyklujte

Varování

- EKG elektrody by měly být používány pouze zdravotnickým personálem, který je obeznámen se způsobem umístění elektrod a jejich použitím. Jakékoli případné alergické či jiné reakce na kůži by měly být okamžite posouzeny lékařem.
- Používejte pouze na neporušenou čistou kůži (nepoužívejte přes otevřené rány, léze, místa se zánětem, otoky apod.)
- Výrobek není určen pro vnitřní použití. V případě náhodného polknutí ihned konzultujte další postup s lékařem.
- Určeno pouze pro jednorázové použití. Použití na dalším pacientovi může způsobit vzájemný přenos infekce. Nevlhčete, nemáčejte a nesterilizujte tento výrobek, takové postupy mohou zanechat škodlivá rezidua nebo způsobit nefunkčnost výrobku. Provedení výrobku a použité materiály nejsou kompatibilní s konvenčními čistícími a sterilizačními postupy.
- Nešetrné odstraňování elektrod může mít za následek poškození kůže pacienta. Pokud půjde elektroda odstranit obtížně, k rozpuštění adheziva můžete použít vodu.
- **NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE GEL SUCHÝ (VYSCHLÝ) NEBO POKUD ZMĚNIL BARVU.**
- V případě, že elektrody nemají vlastní svody, používejte pouze v kombinaci se schválenými svody, adaptéry a monitory EKG.
- Nikdy nedopust'te kontakt s externím elektrickým zdrojem
- V případě použití po delší dobu kontrolujte minimálně jednou denně pevné přilepení elektrody a absenci nežádoucí kožní reakce. Elektrody by neměly být repositionovány.
- Pouze pro RTG-transparentní elektrody: Je důležité mít na vědomí, že označení "rtg-transparentní" se týká pouze elektrod samotných, nikoli monitorů, kabelů či svodů připojených k elektrodě. Elektrody a EKG svody umístěte v případě monitoringu EKG v prostředí MRI v souladu s lokálními bezpečnostními předpisy. Rtg-transparentní elektrody musí být v případě aktivního používání v prostředí MR připojeny pouze svody kompatibilními pro použití v MR.

Doba použití

- EKG elektrody by měly být používány do doby 48 hodin.

Skladování

- Skladujte v originálním obalu při označených teplotních limitech (5 - 30°C), chraňte před účinky vnějších vlivů.
- Po otevření sáčku se snažte elektrody co nejdříve spotřebovat. Zbývající elektrody chraňte před působením vlhkosti přehnutím okraje originálního sáčku a jeho zajištěním (např. sponkou).
- V takovém případě je možné elektrody používat až do doby 30 dnů od otevření sáčku.

Medico Electrodes International Ltd neručí za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody vzniklé z nesprávného použití či zneužití tohoto výrobku.

