

FONENDOSKOPY GIMA

Všechny závažné nehody týkající se námi dodaného zdravotnického prostředku musí být nahlášeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nachází vaše sídlo.

REF 32512 - 32516 - 32518 - 32524 - 32529 - 32531 - 32532 - 32533 - 32534
32535 - 32536 - 32537 - 32538 - 32539 - 32540 - 32541 - 32550 - 32551
32552 - 32555 - 32557 - 32558 - 32559 - 32560 - 32561 - 32562 - 32563
32564 - 32565 - 32566 - 32567 - 32568 - 51000 - 51001 - 51002 - 51003
51004 - 51010 - 51011

M2506-M Rev. 4-03-20



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Taiwan



Gima S.p.A.




Tyto zdravotnické prostředky jsou určeny k askultaci (poslechovému vyšetření).

Nastavení lyry

Lyru umístěte tak, aby úhel byl asi 15° a ušní olivy byly v jedné linii s hřbetem nosu a směřovaly dopředu (viz obrázek).

Tímto způsobem bude lyra zarovnána se zvukovodem a získáte čistý a ostrý zvuk. Držte lyru před sebou s jednou trubicí v každé ruce, otevřete je oddělením trubiček a vložte olivy do uší.

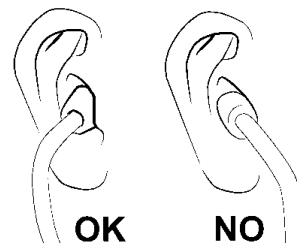

Nastavení napnutí lyry

Pokud máte pocit nepohodlí nebo slabého přenosu, upravte napětí lyry. Jemně přitlačte naslouchací trubice proti sobě, abyste zvýšili napětí, a roztáhněte je od sebe, abyste ho snížili.



• **Pozor: nadměrné napětí by mohlo lyru oslabit.**

• **Pro dosažení nejlepšího poslechu je důležité používat ušní olivy správné velikosti. Je to zvláště důležité, pokud používáte měkké ušní olivy.**

Výměna membrány

Přestože je membrána pevná a navržena pro dlouhodobé užití, může být nutné ji vyměnit.

V tomto případě postupujte následovně:

- Sejměte kroužek na zadní straně, dávejte pozor, abyste jej nepoškodili (u šroubovacích modelů otáčejte kroužkem proti směru hodinových ručiček), poté vyjměte membránu.
- Vložte novou membránu a nasadte zpět vkladací kroužek a ujistěte se, že je bezpečně upevněn (u šroubovacích modelů kroužek otáčejte ve směru hodinových ručiček).

Výběr frekvence / tlumící podložky pouze u modelů s dvojitou hlavou

Otočením hrudního snímače o 180 ° je možné změnit režim poslechu, buď aktivujete membránou nebo zvonek: membrána slouží pro poslech vysokých frekvencí zatímco zvonek pro poslech nízkých frekvencí. Pokud je membrána aktivní, zvonek se uzavře. Tímto je zabráněno rušivým zvukům ze zvonku a naopak. Chcete-li zjistit, která ze dvou stran je aktivní, umístěte olivy do uší a lehce zatlačte na membránu nebo na otvor zvonku.

Čištění a údržba

Pravidelné čištění a kontrola zajistí správnou funkčnost výrobku:

-  • Chraňte tento před extrémním teplem a chladem, rozpouštědly a oleji.

- Neponořujte výrobek do kapalin ani jej nesterilizujte.
- Po každém použití produkt dezinfikujte 70% roztokem isopropylalkoholu.
- Zabraňte poškození výrobku ostrými předměty.
- Pravidelně odšroubovávejte olivy, abyste je vyčistili. Olivы (a případněnutnosti ostatní části výrobku) očistěte alkoholem nebo mýdlovou vodou a před opětovným sestavením je zcela osušte. Ujistěte se, že olivy byly pevně nasazeny na konce lyry.
- Nepoužívejte výrobek rozebraný (např. bez oliv) a/nebo v případě viditelného poškození.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12měsíční standardní B2B záruka Gima

	Pozor: pečlivě si přečtěte pokyny (varování)
	Uchovávejte na chladném a suchém místě
	Chraňte před slunečním světlem
	Výrobce
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) 2017/745
REF	Kód produktu
LOT	Číslo šarže
MD	Zdravotnické prostředek

Distributor ČR:

AZ-Medica Educa s.r.o.

www.azmedicashop.cz

tel: 724 884 041

Poslední revize textu: listopad

2021

FONENDOSKOPY GIMA

Všechny závažné nehody týkající se námi dodaného zdravotnického prostředku musí být nahlášeny výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nachází vaše sídlo.

REF 32512 - 32516 - 32518 - 32524 - 32529 - 32531 - 32532 - 32533 - 32534
32535 - 32536 - 32537 - 32538 - 32539 - 32540 - 32541 - 32550 - 32551
32552 - 32555 - 32557 - 32558 - 32559 - 32560 - 32561 - 32562 - 32563
32564 - 32565 - 32566 - 32567 - 32568 - 51000 - 51001 - 51002 - 51003
51004 - 51010 - 51011

M2506-M Rev. 4-02-20



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Taiwan



Gima S.p.A.




Tyto zdravotnické prostředky jsou určeny k askultaci (poslechovému vyšetření).

Nastavení lyry

Lyru umístěte tak, aby úhel byl asi 15° a ušní olivy byly v jedné linii s hřbetem nosu a směřovaly dopředu (viz obrázek).

Tímto způsobem bude lyra zarovnána se zvukovodem a získáte čistý a ostrý zvuk. Držte lyru před sebou s jednou trubicí v každé ruce, otevřete je oddělením trubiček a vložte olivy do uší.

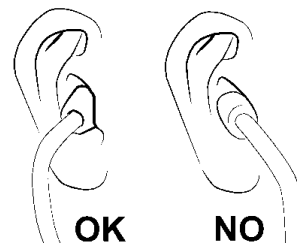

Nastavení napnutí lyry

Pokud máte pocit nepohodlí nebo slabého přenosu, upravte napětí lyry. Jemně přitlačte naslouchací trubice proti sobě, abyste zvýšili napětí, a roztáhněte je od sebe, abyste ho snížili.

- ⚠️ • **Pozor: nadměrné napětí by mohlo lyru oslabit.**
- Pro dosažení nejlepšího poslechu je důležité používat ušní olivy správné velikosti. Je to zvláště důležité, pokud používáte měkké ušní olivy.

Výměna membrány

Přestože je membrána pevná a navržena pro dlouhodobé užití, může být nutné ji vyměnit.

V tomto případě postupujte následovně:

- Sejměte kroužek na zadní straně, dávejte pozor, abyste jej nepoškodili (u šroubovacích modelů otáčejte kroužkem proti směru hodinových ručiček), poté vyjměte membránu.
- Vložte novou membránu a nasadte zpět vkladací kroužek a ujistěte se, že je bezpečně upevněn (u šroubovacích modelů kroužek otáčejte ve směru hodinových ručiček).

Výběr frekvence / tlumící podložky pouze u modelů s dvojitou hlavou

Otočením hrudního snímače o 180° je možné změnit režim poslechu, buď aktivujete membránou nebo zvonek: membrána slouží pro poslech vysokých frekvencí zatímco zvonek pro poslech nízkých frekvencí. Pokud je membrána aktivní, zvonek se uzavře. Tímto je zabráněno rušivým zvukům ze zvonku a naopak. Chcete-li zjistit, která ze dvou stran je aktivní, umístěte olivy do uší a lehce zatlačte na membránu nebo na otvor zvonku.

Čištění a údržba

Pravidelné čištění a kontrola zajistí správnou funkčnost výrobku:

- ⚠️ • Chraňte tento před extrémním teplem a chladem, rozpouštědly a oleji.

- Neponořujte výrobek do kapalin ani jej nesterilizujte.
- Po každém použití produkt dezinfikujte 70% roztokem isopropylalkoholu.
- Zabraňte poškození výrobku ostrými předměty.
- Pravidelně odšroubovávejte olivy, abyste je vyčistili. Olivy (a případněnutnosti ostatní části výrobku) očistěte alkoholem nebo mýdlovou vodou a před opětovným sestavením je zcela osušte. Ujistěte se, že olivy byly pevně nasazeny na konce lyry.
- Nepoužívejte výrobek rozebraný (např. bez oliv) a/nebo v případě viditelného poškození.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12měsíční standardní B2B záruka Gima

	Pozor: pečlivě si přečtěte pokyny (varování)
	Uchovávejte na chladném a suchém místě
	Chraňte před slunečním světlem
	Výrobce
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) 2017/745
REF	Kód produktu
LOT	Číslo šarže
MD	Zdravotnické prostředek

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.

Miranova 148/10

102 00 Praha 10 - Hostivař

www.bexamed.cz

Poslední revize textu: listopad 2021