

RESPIPROGRAM

Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s námi dodaným zdravotnickým prostředkem, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém sídlíte.








REF 33442

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - expórt@gimaitaly.com www.gimaitaly.com

Made in Italy

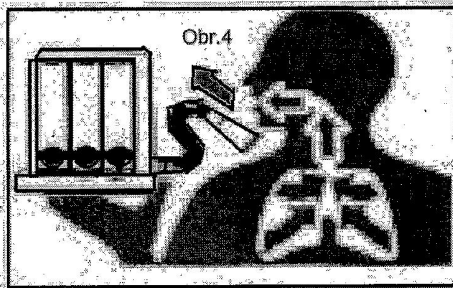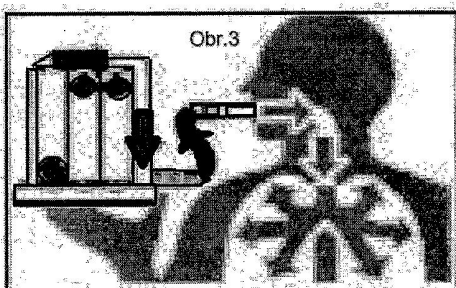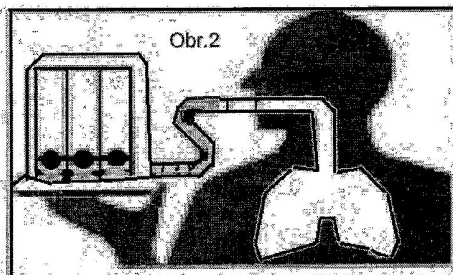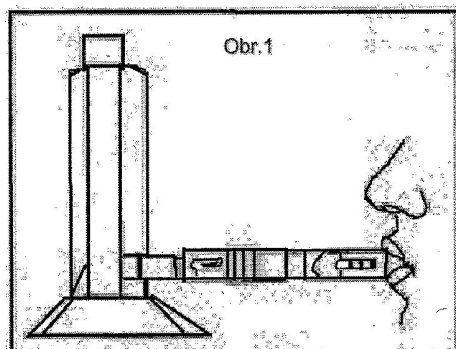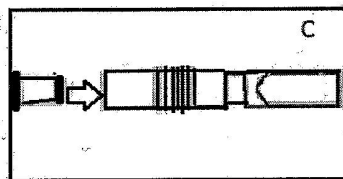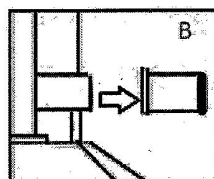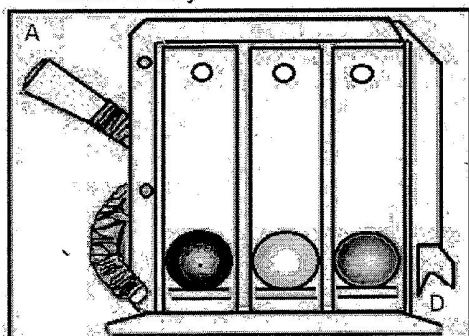

REF	Kód výrobku		Skladujte na chladnem a suchem místě
LOT	Číslo šarže		Skladujte mimo slunečného světla
	Výrobce		Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EÚ) 2017/745
	Nesterilní		Pozor: Pozorně si přečtete a dodržujte pokyny k použití (výstrahy)
MD	Zdravotnický prostředek		Datům expirace
	Přečtete si návod k použití		Vícenásobné použití pro jednoho pacienta

POPIS PRODUKTU

Respirogram je dechový trenažér zaměřený na proudění vzduchu, určený k podpoře hlubokého vdechu (nádechu). Hluboké dýchání pomáhá roztahovat plicní alveoly a uvolňovat dýchací cesty od hlenu.

INDIKACE

Použití k prevenci pooperačních respiračních komplikací, jako jsou atelektáza, pneumonie nebo plicní dysfunkce.

KONTRAINDIKACE

Pro případné kontraindikace se obraťte na svého lékaře nebo terapeuta.

OBSAH BALENÍ

- A) Respirogram;
- B) Konektor s filtrem;
- C) Hadička s náustkem;
- D) Držák náustku s hadicí.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vyjměte pomůcku z obalu a připojte konec hadičky s filtrem k trenažéru.

Za účelem zamezení nechtěného použití jinou osobou můžete přístroj označit svým jménem na bílém podstavci. Pohodlně se posaďte, abyste podpořili optimální rozšíření plic. Pokud nejste schopni zaujmout nebo udržet tuto polohu, provádějte proceduru v jakékoli poloze, pokud zůstane přístroj ve vzpřímené poloze. Naklonění trenažéru snižuje potřebnou námahu a snižuje účinnost cvičení.

Normálně vydechněte a rty pevně přiložte kolem náustku.

1) Maximálně se nadechněte a snažte se zvednout jednu, dvě nebo tři kuličky podle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry.

2) Zadržte dech na 2 až 3 sekundy

3) Pomalu vydechněte nosem a zároveň odstraňte náustek ze rtů.

4) Po každém hlubokém nádechu se uvolněte a normálně dýchejte.

5) Postup opakujte s frekvencí, kterou vám předepsal lékař.

6) Po cvičení zakašlete, abyste odstranili nahromaděné sekrety. Můžete použít malý polštář k podepření hrudníku v případě pooperačních ran.

UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj používejte pouze na základě předpisu a pokynů lékaře.

Pokud během procedury pocítíte závrať, přestaňte a před pokračováním si odpočiňte.

Při použití u dětí musí být dítě během cvičení pod dohledem.

Jako každý zdravotnický prostředek jej uchovávejte mimo dosah dětí.

ČIŠTĚNÍ RESPIROGRAMU

Respirogram je přístroj určený pro jednoho pacienta a měl by být používán po dobu předepsanou lékařem.

Po použití důkladně omyjte náustek čistou teplou (cca 40 °C) tekoucí vodou a nechte jej oschnout. Hadici s náustkem lze uložit do držáku na pravé straně přístroje, přičemž náustek by měl směřovat dolů.

V případě potřeby lze Respirogram rozebrat otevřením bílé základny, což umožní oddělené mytí těla přístroje a kuliček.

Při opětovném sestavování se ujistěte, že jsou všechny části zcela suché, a umístěte každou kuličku do odpovídajícího válce:

Červená kulička do válce označeného 600 cc,

Žlutá kulička do válce označeného 900 cc,

Zelená kulička do válce označeného 1200 cc.

Když přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej na suchém a čistém místě. přístroj lze po ukončení používání zlikvidovat v kontejneru na plastový odpad.

POZNÁMKY

Respirogram není určený k měření průtoku vzduchu. Číselné údaje uvedené na válcích slouží pouze jako orientační pomůcka pro lékaře nebo zdravotní sestru.

Filtr umístěný ve spojovacím bodě hadičky slouží pouze k zabránění vdechnutí cizorodých částic.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Na přístroj se vztahuje standardní 12měsíční B2B záruka Gima.